

Erleben Sie eine leistungsstarke, professionelle Zahnaufhellung

Opalescence Go™ ist ein gebrauchsfertiges Produkt für die Anwendung Zuhause. Mit dem UltraFit™ Tray wird die Zahnaufhellung zu einem noch flexibleren und angenehmeren Erlebnis.

- Das einzigartige Material des UltraFit™ Trays bietet einen besonders komfortablen Sitz und passt sich dem individuellen Lächeln des Patienten an
- Die Abdeckung von Molar zu Molar gewährleistet den Kontakt des Gels mit den Seitenzähnen
- Dank der ausgezeichneten Adaption des UltraFit Trays bleibt das Gel während der Aufhellung mit den Zähnen optimal in Kontakt
- Mit 6% Wasserstoffperoxid (Tragezeit 60-90 Minuten)
- Jedes Patient Kit enthält eine kleine Tube (28,3 g) Opalescence™ Zahncreme





Zahnaufhellung mit Opalescence Go:

Weitere Eigenschaften

- Geschmacksrichtungen Mint und Melone
- Praktische vorgefüllte Trays: Einfach aus der Packung nehmen und tragen
- Optimale Gelmenge: Einfache Entfernung nach der Zahnaufhellung

4634 Opalescence Go Mint 6% Patient Kit
3592 Opalescence Go Melone 6% Patient Kit

Jedes Kit enthält 10 Blisterpackungen mit je einem Tray für OK und UK und 1 Tube (28,3 g) Opalescence™ Zahncreme

4639 Opalescence Go Mint 6% Patient Kit 6 St.
3593 Opalescence Go Melone 6% Patient Kit 6 St.

Jedes Kit enthält 6 Patient Kits

4644 Opalescence Go Mint 6% Mini Kit
3599 Opalescence Go Melone 6% Mini Kit

Jedes Kit enthält 4 Blisterpackungen mit je einem Tray für OK und UK

4649 Opalescence Go Mint 6% Mini Kit 12 St.
3600 Opalescence Go Melone 6% Mini Kit 12 St.

Jedes Kit enthält 12 Mini Kits

Es wird empfohlen, alle Opalescence Go Produkte im Kühlschrank aufzubewahren.

Anwendung



1. Aus der Packung nehmen.



2. Schiene auf Zahnbogen ausrichten.



3. Leicht ansaugen.



4. Äußere Schiene entfernen.



5. Leicht ansaugen.



6. Tragezeit 6%: 60-90 Minuten.